

Perfusor im MR Anleitung

1. Perfusor einschalten; Kippschalter I/0
2. **MODUS auswählen:** Selbsttest abwarten ! Mit **Auswahltaste** Modus wählen u. mit **Eingabetaste** bestätigen. (Häufigster Modus: **ML/HR MODUS** = ml/h (ml per hour).
3. **Bolusgabe:** Bei ML/HR MODUS: Eingabe Bolus ja/nein je nach Wunsch mit Auswahltaste wählen und mit Eingabetaste bestätigen.
4. **Art der Spritze:** Spritzenhersteller mit Auswahltaste „**PERF**“ wählen und mit Eingabetaste bestätigen
5. Spritze einlegen. Alle Verriegelungen müssen exakt an der Spritze anliegen ! Besonders die Klemmhalterung für den Spritzenzylinder **muss genau anliegen!** (Spritzenkala soll 90° zum Tastenfeld stehen) – dann Eingabetaste drücken.
6. **Rate eingeben** und mit Eingabetaste bestätigen und auf **FÖRDERN** (grüne Taste) drücken. (Bei Erfolg leuchtet *grünes Kontrolllicht* und die Rate beginnt zu laufen.)
7. **Bei Ratenänderung:** Rate mittels der 4 Pfeiltasten ändern und mit Eingabetaste bestätigen.